

INTERVIEW

Microneedling System mit Radiofrequenz – ein Update

Frau Dr. med. Lucija Kröpfl ist Fachärztin für Dermatologie und hat sich auf die ästhetische Medizin spezialisiert. Nach mehrjähriger Tätigkeit in England und den USA hat Sie sich mit ihrer ästhetischen Praxis Skinthetics in Düsseldorf Oberkassel niedergelassen. Ein Fokus Ihrer Praxis ist die Lasermedizin.

KM: Mit welchem Radiofrequenz System arbeiten Sie in Ihrer Praxis und wie wirkt dieses Gerät?

L. Kröpfl: Ich arbeite in meiner Praxis intensiv mit dem Genius System von Lutronic. Davor hatte ich schon sehr gute Erfahrung mit dem Vorgänger von Lutronic, dem Infini, gemacht. Das Genius System appliziert durch feine Micronadeln Radiofrequenz Energie direkt in die Dermis. Dadurch wird loses Kollagen zerstört und eine Neubildung von Kollagen und Elastin angeregt. Dies führt zu einer Straffung der Haut. Auch Narbengewebe kann mit dem Genius System effektiv behandelt werden. Hier zerstört die Radiofrequenz Energie das alte Narbengewebe und stimuliert eine Zellerneuerung.



Abb 1: Dr. med. Lucija Kröpfl

KM: Für welche Körperareale wird das Genius System eingesetzt?

L. Kröpfl: Das Genius System wird kontinuierlich von Lutronic weiterentwickelt. Zu

Beginn wurden das Gesicht und der Hals behandelt. Mit neuen technologischen Innovationen und der Entwicklung von neuen Aufsätzen kann der Genius auch am Körper eingesetzt werden. Der neue 20x20mm große Aufsatz (M49D) mit 49 Nadeln eignet sich besonders für größere Areale. Zudem erlaubt uns jetzt die Entwicklung eines feinen Kopfstückes mit 14 Nadeln (P14D) die Behandlung der Malar bags (Schwellbäckchen) im Gesicht. Diese Weiterentwicklung ermöglicht mir ein sehr vielfältiges Spektrum von Anwendungen.

KM: Für welche Indikationen setzen Sie aktuell das Genius System ein?

L. Kröpfl: Das Genius System ist für verschiedene Indikationen geeignet. Ich setze das Genius System häufig zur Behandlung der Cutis laxa in multiplen Arealen wie im Gesicht, am Hals, am Bauch, an den Oberarmen oder an den Oberschenkeln ein. Zudem behandle ich Malar bags im Gesicht. Das Genius System kann auch zur Behandlung verschiedener Narben im Gesicht und am Körper eingesetzt werden.